

STERICUP®

Mode d'emploi

- Détacher le papier pelable, appuyer sur la languette du Stericup® pour le sortir de son emballage en évitant de toucher l'intérieur du récipient.
- Positionner le signe «UP» du manche vers le haut et introduire la languette dans les rainures du manche.
- Après l'injection, comprimer le point d'injection avec le tampon sec afin de coaguler et d'absorber le sang.



Précautions d'emploi

Ne jamais toucher l'intérieur du Stericup® avec les doigts. Une bactérie, un champignon ou un virus peut contaminer la solution. Le virus de l'hépatite C reste présent sur la surface de la peau ainsi que dans les traces de sang, même invisibles.

Ne jamais utiliser un Stericup® déjà utilisé ; même nettoyé, le récipient peut contenir des virus provenant d'une seringue, d'un filtre, des doigts ou de l'eau de quelqu'un d'autre.